

アフターサービス

■安心の問合せ対応

自社のカスタマーサポートを設置しているため、商品知識豊富なスタッフが万全の対応を行います。
点検・修理のご依頼や商品に関するお問い合わせまで全てこちらで受け付けております。



■安心の代替機発送

お客様の大切な商品は修理専門の自社倉庫“サービスセンター”でお預かりし、迅速に修理、交換に対応いたします。
その間、代替機の発送*1も承っております。

*1…当日12時までのご依頼は即日発送いたします。
受付時間 9:00~17:00(平日のみ)



●お問い合わせ先

商品の修理、代替機発送等に関するご依頼は下記窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター 固定電話など ☎ **0120-776-282** (通話料無料)
受付 9:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く) 携帯電話 ☎ **0570-550-637** (通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げの日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。
※月曜日はお電話が混みます。

商品に対する詳しいご説明・お問い合わせはヤーマンプロフェッショナルまで

ヤーマンプロフェッショナル

TEL. **03-5665-1177**

平日 9:00~17:00

[製造販売元] ヤーマン株式会社 東京都江東区古石場1-4-4

オンラインサイト上では24時間メールでの
お問い合わせを受け付けております。

<https://ymn.cm/pro>



SZ-PE-3560

PROFESSIONAL
YAMAN

あげる、輝く。

進化型デザインングフェイシャルマシン

クイーンリフト for Pro TIARA

トリートメントブック





[目次]

お顔・からだの部位のなまえ	2
お顔・からだの筋肉のなまえ	3
クイーンリフトコースの流れ	4
Step1~2 クレンジング・洗顔~ソニックピールトリートメント	5
Step3~4 サーマドレナージュトリートメント、ドレナージュ*	6
Step5 美創筋EMSトリートメント	7
Step6 セレクトダブルモイストトリートメント	8~9
Step7 冷却ひきしめトリートメント	10
オプションコースについて	11~13
よくあるご質問	14
推奨化粧品	15
アフターケアについて	裏表紙




*…エステの手法の名称です

PROFESSIONAL
YAMAN

お顔・からだの部位の名称

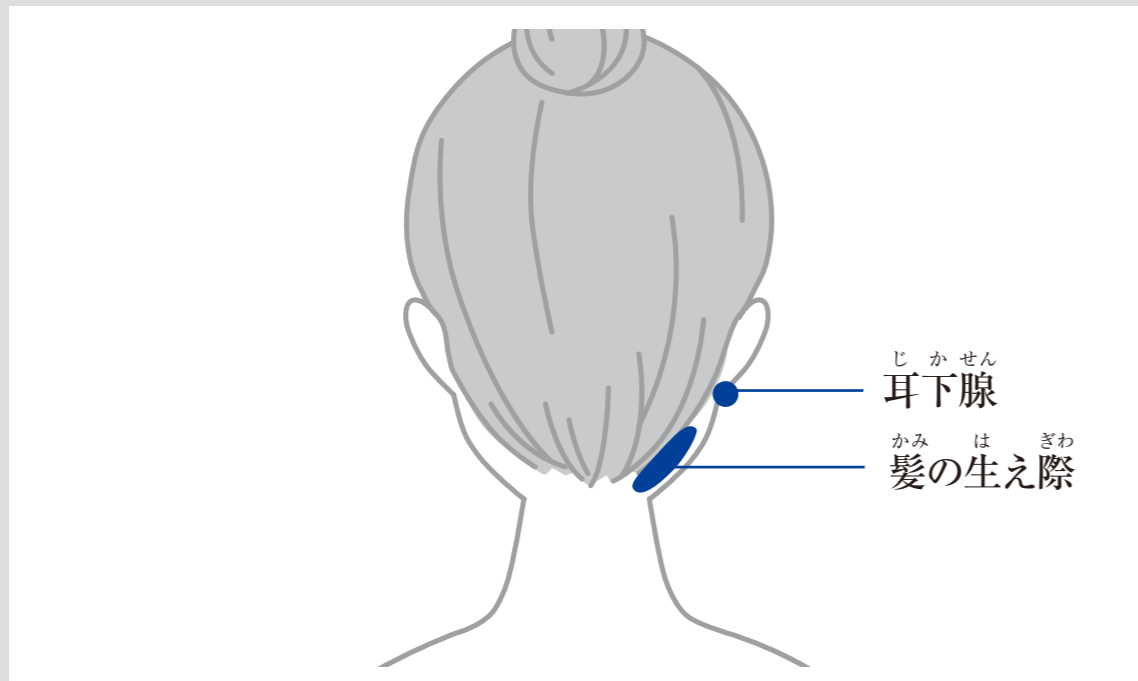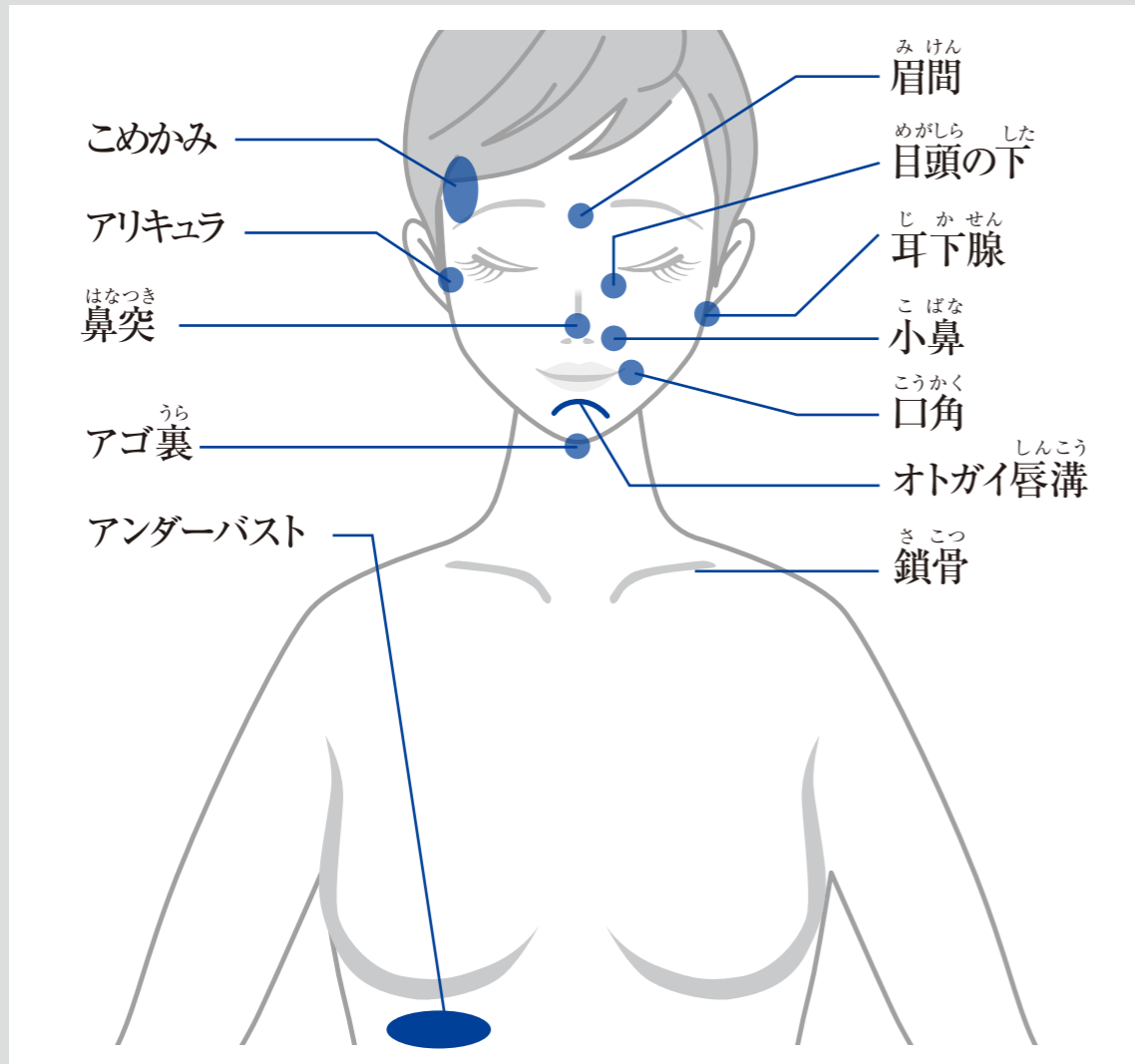

お顔・からだの筋肉の名称

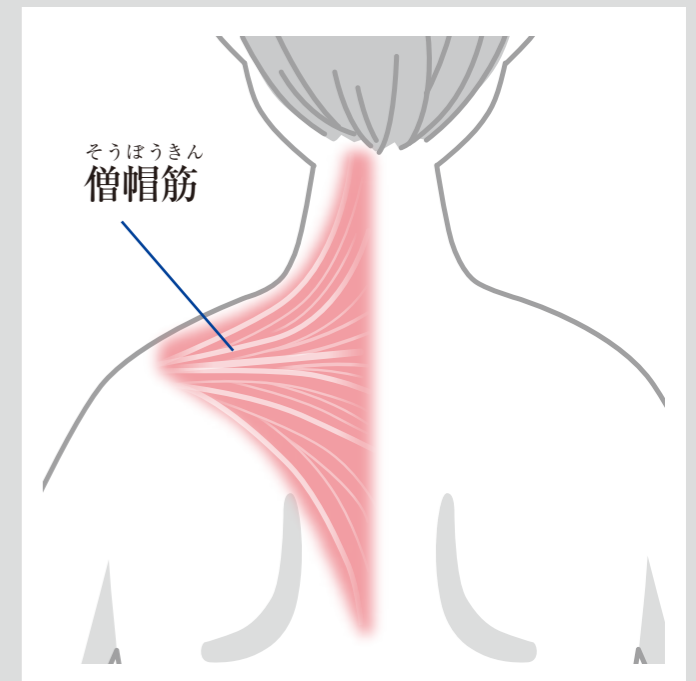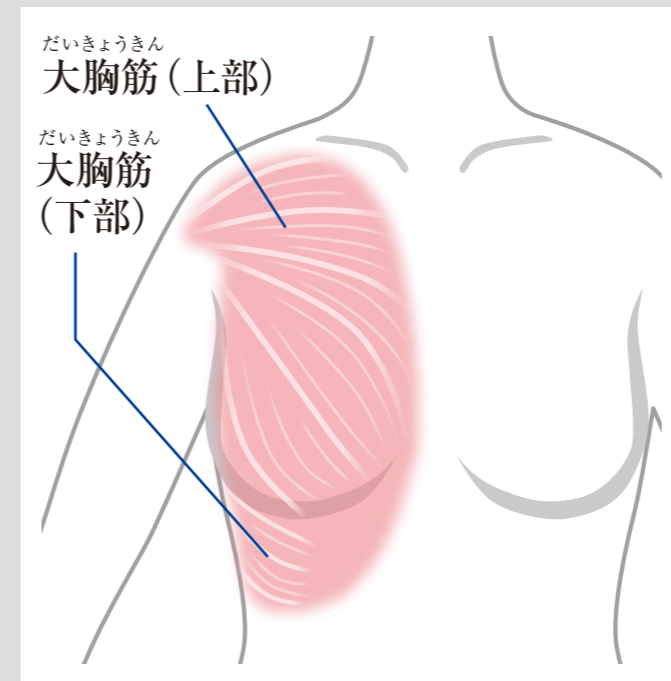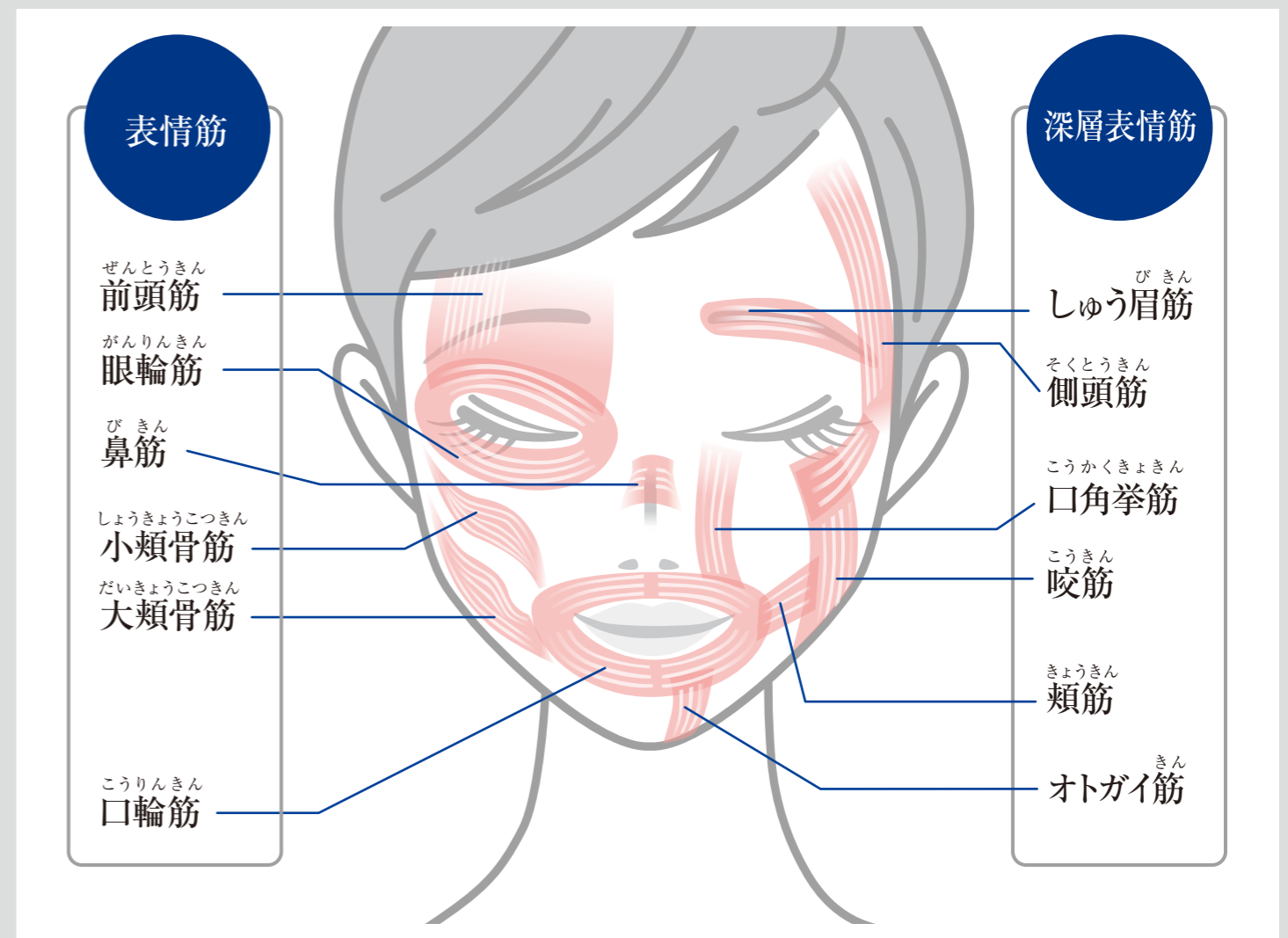



お客様のニーズに結果で応える クイーンリフトコース

クイーンリフト for Pro TIARA を効果的にご使用いただくメソッドをご紹介します。

クイーンリフトコースの流れ

TOTAL 約70分

step1 クレンジング・洗顔 約11分 ※各サロンでのメソッドで実施してください。▶P.5

step2 ソニックピールトリートメント 約5分 ▶P.5

step3 サーモドレナージュ*1トリートメント 約8分 ▶P.6

step4 ドレナージュ*1 約8分 ※各サロンでのメソッドで実施してください。▶P.6

step5 美創筋EMSTトリートメント 約12分 ▶P.7

step6 セレクトابلモイストトリートメント 約10分 ▶P.8,9

step7 冷却ひきしめ*2トリートメント 約3分 ▶P.10

*1...エステの手法の名称です。 *2...肌を冷やして引き締めること

オプションコース
紹介
▶P.11~13

I クリアプラスコース

III 美白DWHPコース

V デコルテ集中コース

II 肌あれTPSコース

IV バスト集中コース

VI 肩・首 集中コース

クイーンリフトコース 詳細

Step1 クレンジング・洗顔

各サロンでのメソッドでクレンジング・洗顔を実施してください。

トリートメント時間(全顔) 約11分

Step2



ソニックピールトリートメント

毛穴つまりと古い角質を除去

毎秒90,000回の超音波振動とイオン導出により詰まり毛穴をスッキリさせる。ヤーマン独自のカップ形状。

トリートメント時間(全顔)	約5分
使用化粧品(全顔)	フレッシュモイストクレンジングジェル
使用プローブ	ソニックピールプローブ
推奨レベル	2




使用方法

PROBE1ボタンを押し、レベルを調整してスタートボタンを押します。

※詳しい操作方法については、取扱説明書をご覧ください。

下記順序で、お顔にプローブを当て矢印に沿ってやさしく動かします。

- ① あご先～耳下
- ② オトガイ唇溝～アリキュラ
- ③ 口角～アリキュラ
- ④ 鼻
- ⑤ 小鼻～こめかみ
- ⑥ 目頭の下～こめかみ
- ⑦ おでこ～こめかみ

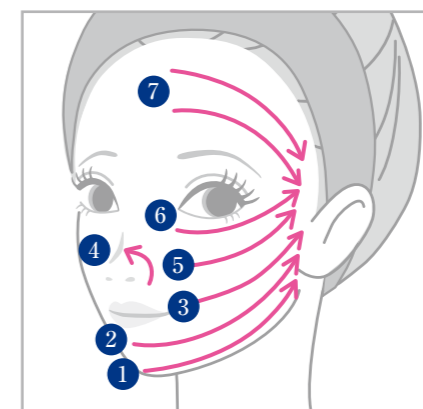

Point


- ヘッドをお肌にやさしく当てゆっくりと動かしましょう。
- 必ずジェルを塗布したお肌に使用しましょう。

毛穴が気になる部分にプローブをやさしくあてて、くるくると動かします。1部位5回転を目安にしてください。

- ⑧ 小鼻
- ⑨ みけん



- ⑩ オトガイ唇溝
- ⑪ 唇上
- ⑫ 鼻横

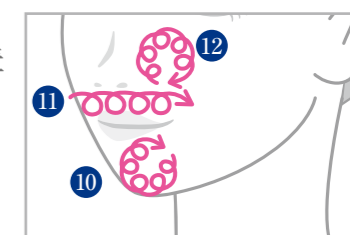



サーモドレナーヂュ*トリートメント

*...エステの手法の名称です。

肌基盤*のゆるみにアプローチ

3MHzのラジオ波による深層*温熱ケアで肌基盤を整えながら、EMSで効率的に筋肉にアプローチ。

*...角質層のこと

トリートメント時間(全顔)	約8分
使用化粧品(全顔)	メソスタイルゲルプレミア
使用プローブ	サーモドレナーヂュプローブ
推奨レベル	3~6



使用方法
PROBE2ボタンを1回押し、レベルを調整し、スタートボタンを押して、トリートメントスタート。
※詳しい操作方法については、取扱説明書をご覧ください。

① アゴ裏～耳下腺から鎖骨


小刻みに動かす (2回)

アゴの裏に電極をぴったりとくっつけて、進行方向に向かって前後にゆっくり動かします。



ストレート (2回)

上記と同じ位置をゆっくり動かします。

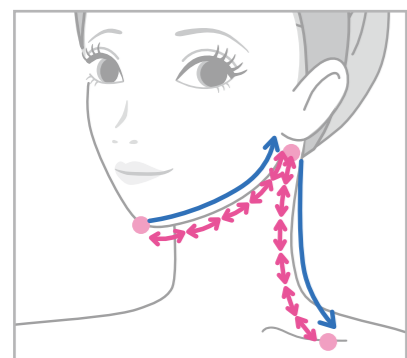

[プローブの動かし方] ②～④共通


回転動作 (2回)

右頬：施術者からみて時計まわり
左頬：施術者からみて反時計まわり

ストレート (2回)

矢印方向にプローブを動かします。

② 口角～アリキュラ

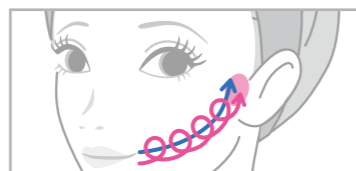


③ 小鼻～こめかみ



④ 目頭の下～こめかみ



⑤ おでこ～こめかみ

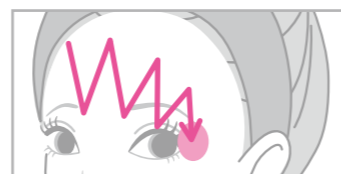

縦に刻むように動かします。(2回)

! ご注意ください

プローブは止めずに必ず動かしながらご使用ください

常に動かす



プローブを一か所に当て続けるとやけど、肌トラブルの原因となります。そのためプローブを早めに動かし、細心の注意を払って施術するようにしてください。

※おでこなど丸みがあり皮膚の薄い部分は特に温感を感じやすくなっております。



美創筋EMSトリートメント

肌の土台の衰えに

特殊な4電極によるタッピングシステムにより、肌の土台の衰えをケア。理想の肌に導きます。

トリートメント時間(全顔)	約12分
使用化粧品(全顔)	メソスタイルゲルプレミア
使用プローブ	美創筋EMSプローブ
推奨レベル	1~6



使用方法
PROBE3ボタンを1回押し、レベルを調整し、スタートボタンを押して、トリートメントスタート。
※詳しい操作方法については、取扱説明書をご覧ください。

① オトガイ筋・あご先～耳下線～鎖骨の順に

5～6回ストレートに動かします。




② 咬筋マニピュレーション*

咬筋～アリキュラ下部まで電極を上下に動かしながら刺激します。(60秒)

※マニピュレーション：筋肉をゆるめるようにアプローチしましょう。

③ 鼻筋トレーニング

鼻筋に沿って電極を当て上下に動かしながら刺激します。(約30秒)

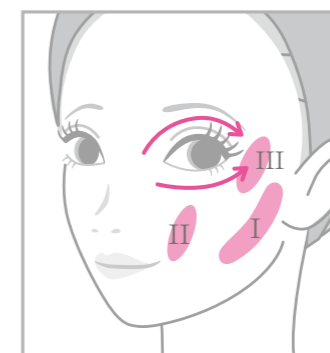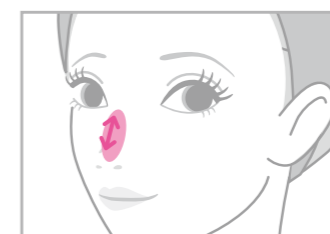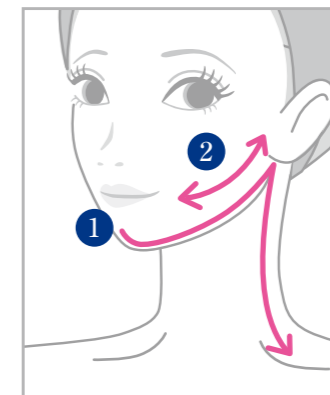


⑤ 前頭筋・しゅう眉筋トレーニング

眉の上部、筋肉の動く部分に電極を10秒間ずつ当てる動作を、5～6回繰り返します。(約60秒)

⑥ おでこ～側頭筋

縦に刻むように動かした後、こめかみの辺りを上下に動かします。(約60秒)

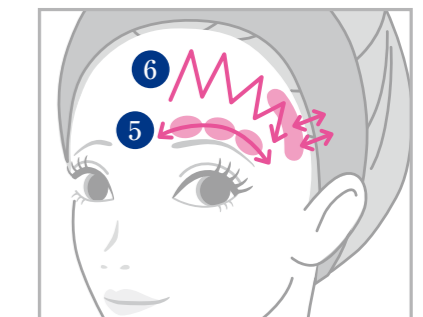

Point

- 約2～3cm/秒で動かします。
- 筋肉が反応する位置を探しましょう。

III. 眼輪筋

矢印の方向に動かした後、目じりに縦方向に電極を置く。

Step4 ドレナーヂュ*

*エステの手法の名称です。

トリートメントの効果を高めるため、ハンドや美創筋EMSプローブでのケアなど各サロンのメソッドでトリートメントを行ってください。

トリートメント時間(全顔)	約8分
使用化粧品(全顔)	メソスタイルゲルプレミア

TPS導入トリートメント

※ TPS導入トリートメントとDWHP美白トリートメントのどちらか1つを選択して施術してください。

DWHP美白トリートメント

※ TPS導入トリートメントとDWHP美白トリートメントのどちらか1つを選択して施術してください。

肌のハリ不足にアプローチ

導入技術TPSにより、美容成分を肌深部まで浸透導入*。

*…角質層まで

トリートメント時間(全顔)	約10分
使用化粧品(全顔)	ナノLセラム
使用プローブ	セレクトابلモイストプローブ、手元電極
推奨レベル	3~6



使用方法

PROBE4ボタンを1回押し、お客様に手元電極を握っていただき、レベルを調整し、スタートボタンを押してトリートメントスタート。

※詳しい操作方法については、取扱説明書をご覧ください。

肌のくすみ*1にアプローチ

ヤーマン史上最高級*2の美白成分*3導入技術と緑LEDにより、美白浸透*4をサポート。

*1…お肌のうるおい不足による *2…ヤーマンの業務用機器として
*3…ビタミンC誘導体、トラネキサム酸、ナイアシンアミド *4…角質層まで

トリートメント時間(全顔)	約10分
使用化粧品(全顔)	ナノLセラム
使用プローブ	セレクトابلモイストプローブ、手元電極
推奨レベル	3~6




使用方法

PROBE4ボタンを2回押し、お客様に手元電極を握っていただき、レベルを調整し、スタートボタンを押してトリートメントスタート。

※詳しい操作方法については、取扱説明書をご覧ください。


① アゴ裏中央~耳下腺

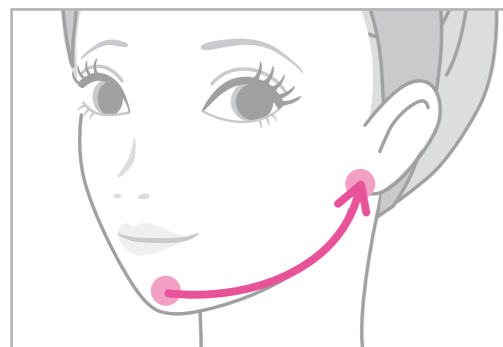


アゴの裏に電極をぴったりとくっつけて耳下腺まで動かします。(5回)

[プローブの動かし方] ②~④共通
矢印方向にゆっくりとプローブを動かします。


② オトガイ唇溝~アリキュラ

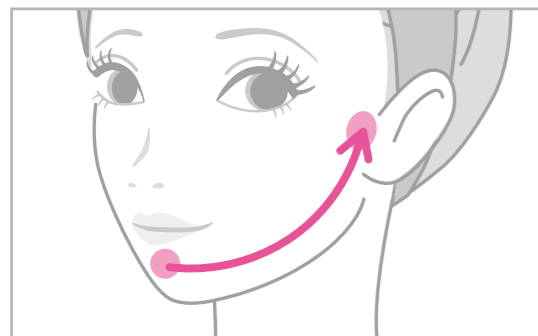

③ 口角~アリキュラ

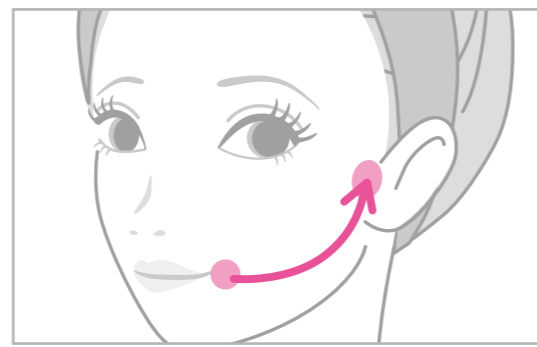


④ 小鼻~こめかみ

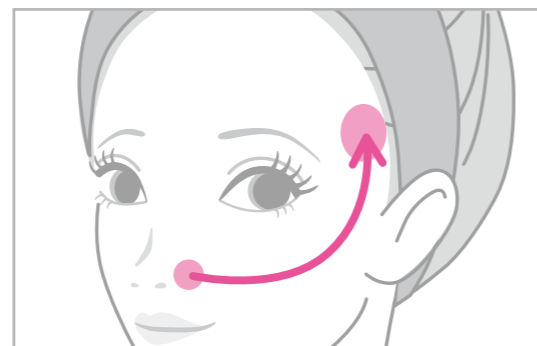


おすすめの成分

アスタキサンチン、イソフラボン、グリセリン、スクワラン、トレハロース、ビタミンA(レチノール)、ビタミンB3(ナイアシンアミド)、ビタミンE(トコフェロール)、尿素、BG、PG、Bカロチン


⑤ 小鼻~鼻突

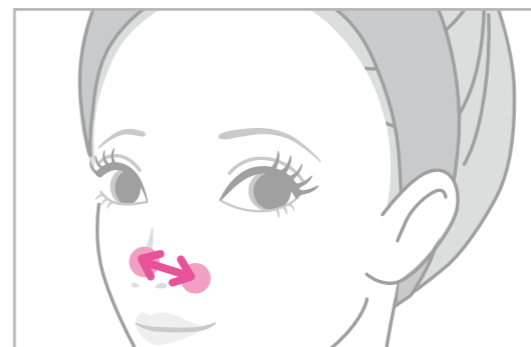

⑥ 目頭の下~こめかみ

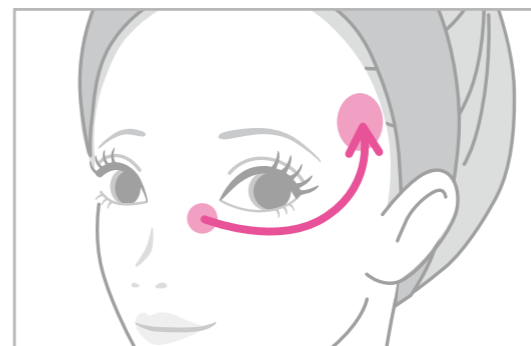

⑦ おでこ~こめかみ

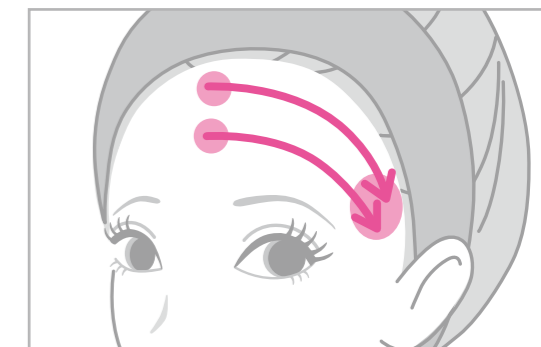

Point

- ヘッドをゆっくりと(約1~2cm/秒)動かしましょう。
- ヘッド全面をお肌にぴったり密着させましょう。

おすすめの成分

ビタミンC、ビタミンC誘導体、トラネキサム酸、コウジ酸、ハイドロキノン、アルブチン

冷却+青色LEDでトリートメント仕上げ

冷やすことでハリとキメの整ったお肌に導きます。
すべてのステップが終わった後に行います。

トリートメント時間(全額)	3分(変更不可)
使用化粧品	なし
使用プローブ	セレクトابلモイストプローブ(COOLモード)
推奨レベル	1(変更不可)




使用方法

PROBE4ボタンを3回押し、スタートボタンを押してトリートメントスタート。

※レベル、使用時間の調整はできません。
※詳しい操作方法については、取扱説明書をご覧ください。

下記順序で、お顔にヘッドを直接当て、
スタンプを押すように(約1秒)
「押し当て→離す→移動」を繰り返します。

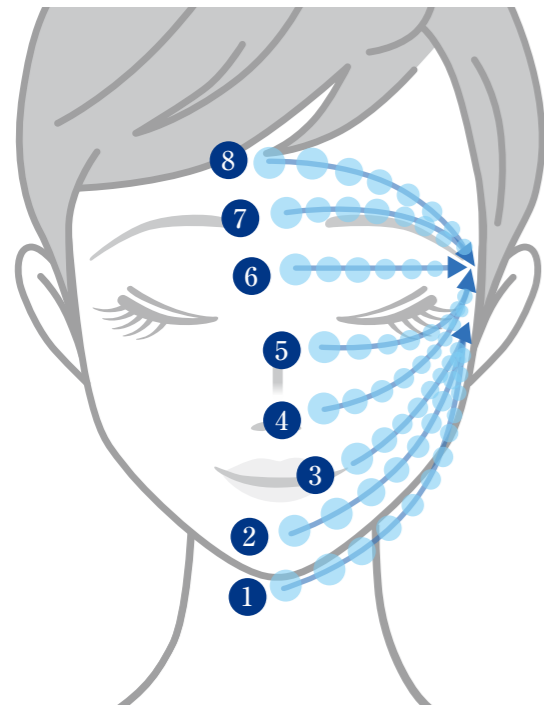

- ① アゴ裏～アリキュラ
- ② オトガイ唇溝～アリキュラ
- ③ 口角～アリキュラ
- ④ 小鼻～こめかみ
- ⑤ 目頭の下～こめかみ
- ⑥ 眉間～まぶた～こめかみ
- ⑦ 眉頭～こめかみ
- ⑧ おでこ中央～こめかみ

Point

- スタンプを押すように動かしましょう。
- まぶたは特に優しくケアしましょう。

オプションコース

I クリアプラスコース

約10分間

オプション金額(推奨)

+¥3,000

トリートメント時間(全額)	約10分
使用化粧品	フレッシュモイストクレンジングジェル
使用プローブ	ソニックピールプローブ
推奨レベル	2

クレンジング、洗顔にてお肌を整えた後にソニックピールプローブで、特に汚れが気になる部位を重点的にケアします。

プローブの動かし方については、
STEP 2 ソニックピールトリートメントと同じです。
仕上げに美容液等でお肌を整えてください。

ソニックピール
プローブ

ゲルを添付したお肌にヘッドをやさしく当て、矢印に沿ってゆっくり動かします。



毛穴が気になる部分にはヘッドをくるくると動かします。1部位5回転を目安にしてください。

II 肌あれTPSコース

約10分間

オプション金額(推奨)

+¥3,000

トリートメント時間(全額)	約10分
使用化粧品	お好みの美容液
使用プローブ	セレクトابلモイストプローブ
推奨レベル	3~6

クレンジング・洗顔後、ナノLセラム等の美容液で整えたお肌に**イソフラボン、グリセリン**などを多く含んだ美容液を用いてトリートメントを行います。

プローブの動かし方については、
STEP 6 TPS導入トリートメントと同じです。
(仕上げに3分冷却ひきしめトリートメント)

セレクトابل
モイストプローブ
(TPSモード)

III 美白DWHPコース

約10分間

オプション金額(推奨)

+¥3,000

トリートメント時間(全額)	約10分
使用化粧品	美白成分を含んだ美容液
使用プローブ	セレクトابلモイストプローブ
推奨レベル	3~6

クレンジング・洗顔後、ナノLセラム等の美容液で整えたお肌に**美白成分(ビタミンC誘導体、トラネキサム酸、ナイアシンアミドなど)**を多く含んだ美容液を用いてトリートメントを行います。

プローブの動かし方については、
STEP 6 DWHP美白トリートメントと同じです。
(仕上げに3分冷却ひきしめトリートメント)

セレクトابل
モイストプローブ
(DWHPモード)

IV バスト集中コース

約30分間
オプション金額(推奨)
+¥5,000

トリートメント時間	約20分
使用化粧品	メソスタイルゲルプレミア
使用プローブ	サーモドレナージュプローブ (PROBE2ボタンを1回押し、RFのみ点灯状態にする) 美創筋EMSプローブ
推奨レベル	サーモドレナージュプローブ: 5~7 美創筋EMSプローブ: 4~8


1 ハンドケア

① ハンドで背中へのケア(約10分)。腰部分から胸の横までをケア。(各サロンのメソッドで行ってください。)


2 サーモドレナージュプローブ ※約1~2cm/秒で動かします。



サーモドレナージュ
プローブ

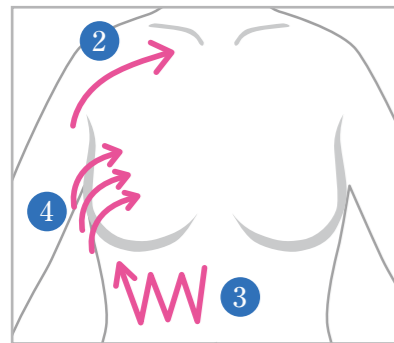


- ② バストの上部を外から内側に向かって動かします。
 - ③ お腹のお肉をバストに集めるように動かします。
 - ④ 脇のお肉をバストに集めるように動かします。
- ②~④を片側約4分間繰り返します。

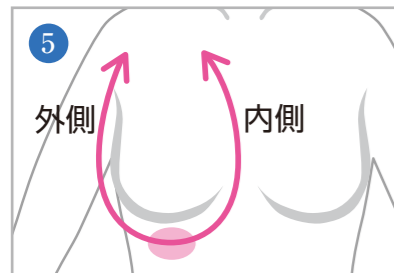

- ⑤ 集めたお肉をバストのサイド・内側に沿ってバスト上部まで持っていくように動かします。
- ⑤を片側約3分間繰り返します。

3 美創筋EMSプローブ ※約2~3cm/秒で動かします。

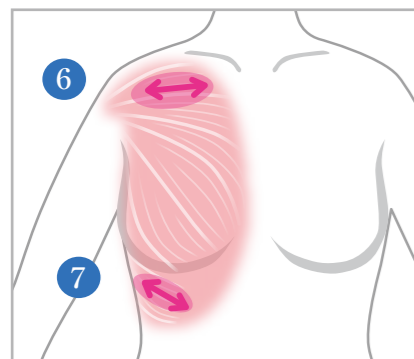

- ⑥ 大胸筋(上部)をEMSで刺激します。
 - ⑦ 大胸筋(下部)をEMSで刺激します。
- ⑥~⑦を片側約3分間繰り返します。



美創筋
EMSプローブ

警告

プローブは止めずに必ず動かしながらご使用ください

常に動かす

プローブを一か所に当て続けるとやけど、肌トラブルの原因となります。そのためプローブを早めに動かし、細心の注意を払って施術するようにしてください。

※おでこなど丸みがあり皮膚の薄い部分は特に温感を感じやすくなっております。

V デコルテ集中コース

約10分間
オプション金額(推奨)
+¥2,000

トリートメント時間(全額)	約10分
使用化粧品	メソスタイルゲルプレミア
使用プローブ	美創筋EMSプローブ
推奨レベル	5~8



美創筋EMS
プローブ

美創筋EMSプローブ

※約2~3cm/秒で動かします。

① 鎖骨のまわりのケア


外側から内側へ、鎖骨に沿って滑らせます。(5回) 5回目、鎖骨の中心で5秒キープします。左右両側行います。



5回目
5秒
キープ


② 首のケア

耳下腺から鎖骨中心に向けて、プローブを滑らせます。(5回) 左右両側行います。

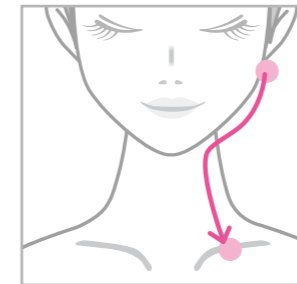

③ 鎖骨のケア

下図の位置にプローブを置き、5秒ずつキープします。左右両側行います。

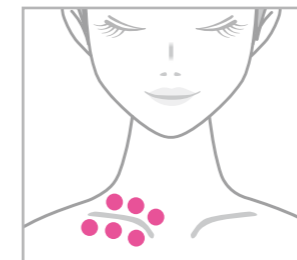

④ 最後に①②をもう一度行います。

VI 首・肩集中コース

約30分間
オプション金額(推奨)
+¥5,000

トリートメント時間(肩全体)	約30分
使用化粧品	メソスタイルゲルプレミア
使用プローブ	サーモドレナージュプローブ 美創筋EMSプローブ
推奨レベル	サーモドレナージュプローブ: 4~7 美創筋EMSプローブ: 7~9




サーモ
ドレナージュ
プローブ

1 サーモドレナージュプローブ

※約1~2cm/秒で動かします。

- ① 耳下腺から僧帽筋上部に向かって動かします。(計10回) 左右両側行います。

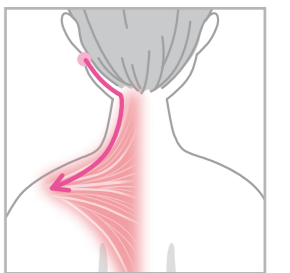


2 美創筋EMSプローブ


※約2~3cm/秒で動かします。

美創筋
EMS
プローブ


- ② 耳下腺から僧帽筋上部に向かって動かします。(計10回) 左右両側行います。

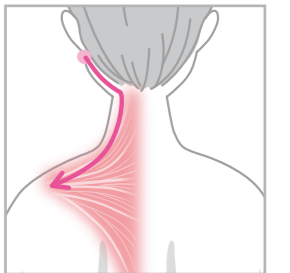

- ③ 髪の毛の生え際に沿ってプローブで刺激します。(計約60秒) 左右両側行います。

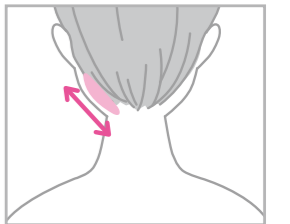

- ④ 右図の3箇所を15秒ずつ刺激。(各5回) 左右両側行います。

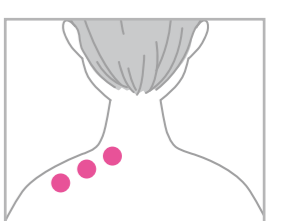

②~④を約20分間繰り返します。

- ⑤ 耳下腺から僧帽筋に向かって動かします。(5回/②と同じ動き) 左右両側行います。



クイーンリフト for Pro TIARA

よくあるご質問



クイーンリフト for Pro TIARAは痛いのでしょうか？

トリートメント部位や出力によって痛みを感じることもございます。特にEMSはピリピリやチクチクとした電気刺激による痛みを伴うことが多いです。必ずお客様の様子をうかがいながら施術してください。

クイーンリフト for Pro TIARAは熱いですか？

トリートメント部位や出力によって熱く感じることもございます。必ずプローブを動かしながらご使用ください。クイーンリフト for Pro TIARAは特許技術の「特殊円状フラット電極ヘッド*」により、深部を強力に温めながらも肌表面のぴりつきや局所的な過熱を抑えた設計になっています。不快感なく、効果的なトリートメントをすることができます。

*…特許取得番号：6212608号

警告 必ずプローブを動かしながら使用してください。
プローブを一か所に当て続けるとやけど、肌トラブルの原因となります。

誰にでも効果がありますか？

一律ではなく個人差がございます。お客様の肌質や、エステティシャンのトリートメントの仕方によっても、結果は変わります。お客様のご希望をしっかりと聞くことで結果に繋がります。

クイーンリフト for Pro TIARAのトリートメントを受けられない人はいますか？

医用電気機器（ペースメーカー等）を使用している方は、トリートメントをお受けいただけません。またお客様の肌の状態やご体調等によって、トリートメントをお受けいただけない場合がございます。判断できない場合は、施術前に医師にご相談ください。

歯に違和感を感じます。

歯を治療中の人、歯に詰め物がある人は、EMSの刺激により、歯に違和感を感じることがあります。
レベルを下げ、使用部位を調節してご使用ください。

サーモドレナージュモード、RFモード使用後にお肌がほてります。

RFの温めによるものです。
気になる場合はクールモード、保冷剤を使用するなどしてお肌を冷やしてください。

使用してはいけない化粧品はありますか？

乳液やクリーム、オイルなどの油性の化粧品は機械の劣化を早める恐れがございますので、使用しないでください。また、温感や刺激感のある化粧品は肌トラブルの原因となりますので、避けるようにしてください。



推奨化粧品

Recommended Cosmetics

マシンとの併用におすすめのフェイシャルスキンケア
ヤーマンプロフェッショナルのスキンケアは全て「7つのフリー処方」。お肌への優しさを追求します。

7つのフリー	香料	パラベン	着色料	エタノール
処方	鉱物油	シリコン	石油系界面活性剤	



レモングラス & ラベンダーの香り
フレッシュモイスト
クレンジングジェル

濃密ジェルで摩擦を抑え、9種の植物エキスが汚れを落としながらうるおいを保ちます。

120g : 6,600円(税込)

※サロン価格はお問い合わせください



レモングラス & ラベンダーの香り
フレッシュモイストソープ

美容成分約57%配合。ミネラル成分の"シリカ"が毛穴の汚れや古い角質を吸着。うるおいのある構なお肌へと導きます。

120g : 6,600円(税込)

※サロン価格はお問い合わせください



メソスタイルゲルプレミア

エステで話題の肌引き締め成分「ホスファチジルコリン」を含んだ植物由来の引き締め成分を豊富に配合。超音波・EMS・RFの効果を最大限に引き出します。ハリのある明るいお肌へ。

200g : 4,730円(税込)

500g : 6,930円(税込)

※サロン価格はお問い合わせください



ナノリフトセラム

ナノサイズのカプセルに美容成分を贅沢に配合。独自技術と厳選天然成分に融合により、肌悩みにアプローチします。

100mL : 16,500円(税込)

※サロン価格はお問い合わせください



お得な フェイシャルコスメ 特別セットもご用意

フレッシュモイストクレンジングジェル 120g×4本
フレッシュモイストソープ 120g×2本
ナノリフトセラム 100ml×1本
メソスタイルゲルプレミア 500g×2本

※詳しくはお問い合わせください